

社会医療法人石川記念会 HITO 病院様と共同開発※

ウイルスの目からの侵入を低減

日本製

※石川ヘルスケアグループ社会医療法人石川記念会 HITO病院
愛媛県四国中央市上分町788-1

マスクにつけられるアイシールド

プロ仕様


いつものマスクに「パッと」カンタン取付!

Point 4

上が開いているため
曇りにくく、蒸れにくい

Point 1

左右の切れ込みに
市販のマスクのゴム
を通すだけ!

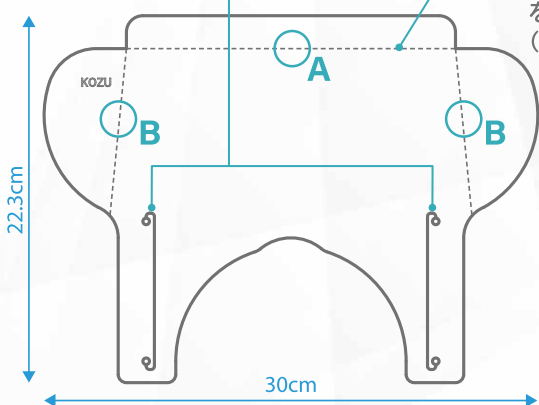

Point 2

罫線Aを折ることで曲面を平らにできます
罫線Bを折ることで横からの飛沫をさらに守ることができます。
(折らなくても使用できます)

Point 3

軽いので
長時間装着しても
疲れにくい



罫線A・Bを折った際の
装着イメージ

使い方



- ① アイシールドのアルファベットが右側にくるように置きます(この時、アイシールドのアルファベットは反転した状態になっています)
- ② アイシールドの上に市販のマスクを置き、左右の切れ込みにゴムを通します(丸穴にゴムがきちんと入ったことを確認してください)
- ③ マスクを装着し、位置・バランスを調整してください
アイシールドのアルファベットが正しく読める面を表側(外側)にしてください

製品の特長

- ・左右の切れ込みに市販のマスクのゴムを通すだけの簡単装着
- ・罫線Aを折ることにより曲面が若干、平らになります
- ・眼を飛沫、ほこり、油汚れ、煙から保護します

▼詳しい使い方につきましては弊社ホームページをご覧ください

マスクにつけられる
アイシールドの使用方法



製品サイズ: 約30cm×約22.3cm
材質: ポリエチレンテレフタレート
JAN: 4570088090034

- ・マスクは付属していません。
- ・本商品は飛沫感染を低減するためのものであり、完全にウイルスの侵入を防げません。
- ・マスクの素材・形状によっては使用できない場合があります。
- ・車、バイクなど車両の運転時には絶対に使用しないでください。
- ・実環境にてテストを行ってから使用してください。
- ・光の反射により、前が見えづらい場合があります。
- ・マスクの紐が切れると落下する場合があります。



【小さいタイプ】