

透明衛生マスク [マスクリア]
masclear[®]
 New Transparent Sanitary Mask masclear

**特許
取得商品**

NEWマスクリアの新機能

- ・ワンタッチフィルム交換式
- ・あごストッパーにシリコンパッド採用
- ・簡単バンド交換

笑顔の見える**透明**マスク

FREE 透明衛生マスク [マスクリア]
BASIC masclear
 NEW COME TO LIFE

マスクリア（ベーシックタイプ）は、もっともスタンダードな透明マスクです。
 曇り止め・抗菌加工がされた透明マスクは、接客業やサービス業を中心に支持されています。
 ベーシックタイプの場合、ワンタッチで簡単にフィルム交換ができるほか、
 あごに装着するストッパーにシリコンパッドを採用しているため、
 1日中快適に過ごせるのが最も大きなアドバンテージです。



注) フィルムの拭き取りの際、アルコール系除菌剤のご使用はお控えください。

品番：WM-BASIC-1	JANコード：4580468701009
サイズ：フリーサイズ（フィルム高さ 65mm）	材質：透明フィルム／ポリカーボネート フレーム／ポリカーボネート ストッパー／ポリカーボネート シリコンパッド／シリコンゴム バンド／ポリアミド、ポリウレタン オーリング／ニトリルゴム クロス／ポリアミド 携帯袋／ポリエチレン ネックストラップ／ポリエチレン・SUS304
パッケージサイズ 箱： W160mm×D56mm×H145mm 重量 87g	
セット内容 1個： 本体×1 クロス×1 携帯袋×1 ネックストラップ×1	



New Transparent Sanitary Mask


**WHITE
FREE
1PC**

Wincam® HEADSET MASK


ウィンカム ヘッドセットマスク



製品の使用方法

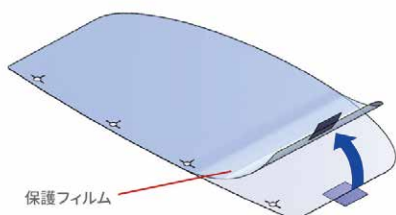


① 保護フィルムを剥がします。

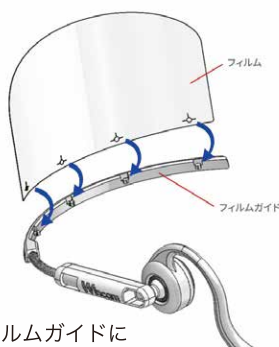


② フィルムガイドにフィルムを取り付けます。




③ 装着 - ヘッドバンドを頭の後ろに通して、両耳の上にハウジングをセットします。

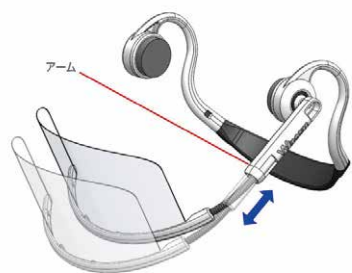

④ 長さ調整 - 使用者の顔のサイズに合わせてアームの長さを調節できます。

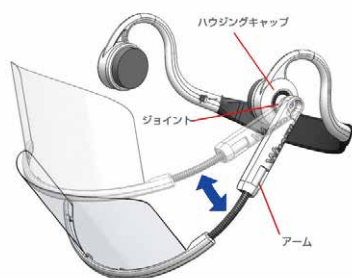

⑤ 角度調整 - 使用者の顔の位置にあわせてハウジングキャップとアームのジョイントを動かして角度調整できます。

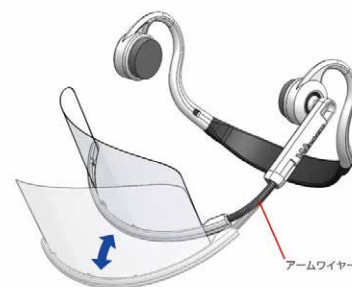

⑥ フィルム位置調整 - 使用者の顔の位置に合わせてアームワイヤーを動かし、フィルムと口元との距離を調整できます。

品番：W-HSM-1W	JANコード：4580468700705
サイズ：フリーサイズ	材質：透明フィルム／ポリカーボネート フィルムガイド／ポリカーボネート アーム／ポリカーボネート、ABS アームワイヤー／炭素鋼 ハウジング／ポリカーボネート、鉄 スポンジ／ポリウレタン ヘッドバンド／ポリプロピレン
パッケージサイズ： W140×D50×H170 (+ハッダ [®] -30) (mm)	
入数：1個入り	